

Zahn-Fit®

Zahnfüllstoff für Notfälle

Ein provisorisches Füllmaterial,
das ausgefallene Zahnplomben
sofort und vorübergehend ersetzt.

Zahn-Fit® ist ein auf Zinkoxid basierender vorübergehend anwendbarer Zahnfüllstoff für Notfälle.

Zahn-Fit® ist direkt anwendbar und muss nicht erst angerührt werden.

Zur Anwendung bitte den nachstehenden Anweisungen folgen. Danach möglichst bald den Zahnarzt konsultieren. Vor der Verwendung die Zähne gründlich reinigen.

Gebrauchsanweisung:

1. Eine kleine Menge **Zahn-Fit®** entnehmen.
2. Die Masse auf den zu füllenden Zahn aufbringen und anschließend Zähne leicht zusammenpressen. Die Paste härtet bei Kontakt mit dem Speichel.
3. Eine Minute lang warten und anschließend den Mund mit lauwarmem Wasser ausspülen. Wasser nicht schlucken.
4. Mindestens 15 Minuten weder auf die neue Füllung beißen, noch weiteren Druck ausüben.
5. Bei schwer zugänglichen Stellen die beigepackte Spachtel verwenden.
6. So bald wie möglich (innerhalb 28 Tage) einen Zahnarzt konsultieren.
7. Unter kalten Bedingungen kann es schwierig sein das Füllmaterial aus dem Behältnis zu nehmen. In solchen Fällen den Behälter mit der Hand erwärmen und anschließend den Anwendungsvorgang wiederholen.

Zur Beachtung: Nach der Entnahme **Zahn-Fit®** Reste nicht wieder in den Behälter zurückgeben.

Aufbewahrung: Nach Verwendung gut verschließen und kühl und trocken aufbewahren.

Inhaltsstoffe in g/100:

Zinkoxid 40, Kalziumsulfat 30, Butylcitrat 20, Kaliumsulfat 10.

1 Packung zu 3 g e

Wissenschaftliche
Produktentwicklung/Hersteller:
GAP Research Company Ltd.,
Unit 2, Ebbsfleet Estate, Stonebridge Road
Northfleet, Kent DA11 9DZ, UK.
Issue 3 2-2017

Vertrieb:

 **DICOPHARM** GmbH
DISTRIBUTION | CONSULTING | PHARMA
4600 Wels, AUSTRIA
www.dicopharm.com

Zahnplombe verloren?

ZAHN-FIT® SELBSTHILFE • SOFORTHILFE



Ein provisorisches
Füllmaterial, das
ausgefallene
Zahnplomben
sofort und
vorübergehend
ersetzt.

**Gebrauchsfertig
direkt aus dem
Behältnis**

Gebrauchsinformation
auf der Rückseite
beachten!



NOTFALL

ausgebrochene Plombe

ZAHN-FIT®

als Zwischenlösung

Praktisch jeder, der älter als 16 Jahre ist und noch über seine natürlichen Zähne verfügt, hat eine oder mehrere Plomben. Die Wahrscheinlichkeit eine Füllung überraschend zu verlieren steigt mit dem Alter der Plomben. Wenn die Plombe herausgefallen ist, sammeln sich an ihrer Stelle Essensreste an. Es kommt zu Entzündungen und der Zahn wird hitze- und kälteempfindlich. Ein Besuch beim Zahnarzt ist unumgänglich, oft sogar als Notfall- oder Schmerzpatient. Das Problem verschlimmert sich noch, wenn so eine Zahnbehandlung abends, am Wochenende oder im Urlaub notwendig wird.

Was ist **ZAHN-FIT®**?

ZAHN-FIT® ist ein Zahnfüllmaterial zur provisorischen Versorgung des Zahnes bei ausgebrochenen Plomben. Es wird verwendet um den Hohlraum im Zahn zu füllen, der nach dem Verlust einer Gold-, Amalgam-, Kunststoff- oder Keramikplombe entsteht. **ZAHN-FIT®** härtet rasch bei Kontakt mit Speichel, bietet ausreichende Haltbarkeit und vorübergehenden Schutz für den Zahnnotfall.

ZAHN-FIT®

hat Vorteile für Patient
und Zahnarzt

1. Ein wichtiges zahnhygienisches Problem wird auf einfachste Art und Weise gelöst.
2. Man kann in Ruhe und ohne zeitlichen Druck einen Zahnarzttermin vereinbaren.
3. Das Produkt benötigt keine Vorbereitung und kann sofort verwendet werden.
4. Zahnärzte sind mit den in **ZAHN-FIT®** verwendeten Materialien bestens vertraut und können **ZAHN-FIT®** ohne Probleme entfernen.

ZAHN-FIT®

gehört in Ihre Reiseapotheke
besonders bei Auslandsreisen

Der Hygienestandard in den industrialisierten Ländern hat bei zahnärztlichen Eingriffen ein sehr hohes Niveau erreicht. Dieser kann allerdings in weniger entwickelten Ländern nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden.

Das Risiko, sich z.B. an Aids oder Hepatitis B zu infizieren, ist dort ungleich höher. Deshalb ist es für jeden, der in solche Regionen fährt, gleichgültig ob auf Urlaub oder Geschäftsreise, äußerst wichtig vorsichtig zu sein.

Hat der Betroffene **ZAHN-FIT®**
in seiner Reiseapotheke kann er dieses
Infektionsrisiko im Notfall verhindern.

SELBSTHILFE • SOFORTHILFE • SELBSTHILFE • SOFORTHILFE