

Gebrauchsanweisung DIKRO-FIT

DIKRO-FIT ist ideal für das vorübergehende Zementieren von herausgefallenen Kronen, Brücken, Verblendungen, Gussfüllungen und Teilkronen (festsitzende Prothesen), die normalerweise auf Dauer fest im Gebiss sitzen.

Die nachfolgende Gebrauchsanweisung ist genau zu beachten:

Zuerst die Zähne sorgfältig reinigen. Danach die herausgefallene Prothese ebenfalls gründlich reinigen und waschen. Falls erforderlich trockene, alte Zementreste mit einer Nadel von der Pressfläche der Prothesen entfernen.

1. Nach Öffnen der Packung eine Kapsel entnehmen. Durch leichtes Antippen der Kapsel das Pulver in der größeren Kapselhälfte sammeln. Dann die zwei Kapselhälften auseinanderziehen.
2. Drei Tropfen Wasser aus dem Wasserhahn in die Kapselhälfte mit dem Pulver tropfen lassen.
3. Die Kapsel schnell wieder verschließen.
4. Die Kapsel zwischen Daumen und Mittelfinger halten und drei Sekunden lang schütteln.
5. Die Kapsel wiederum öffnen und das Zementgemisch auf die Passfläche der Prothese aufbringen.
6. Die Prothese wieder einsetzen und hin und her bewegen, bis sie fest sitzt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Prothese fest und bequem, auch bei geschlossenem Kiefer, sitzt und nicht wackelt. Falls dies nicht der Fall ist die Prothese schnell entfernen und den Zementiervorgang wiederholen.