


## Dikro-Fit

Ein praktischer Zement für das vorübergehende Befestigen locker gewordener Kronen, Brücken, Verblendungen, Gussfüllungen und Teilkronen

**Dikro-Fit** ist ideal für das vorübergehende Zementieren herausgefallener Kronen, Brücken, Verblendungen, Gussfüllungen und Teilkronen (feststehende Prothesen), die normalerweise dauerhaft im Gebiss fixiert sind. Zur Anwendung bitte den nachstehenden Anweisungen folgen. Danach möglichst bald den Zahnarzt konsultieren. Vor der Anwendung sollten die Zähne gründlich geputzt werden. Danach die herausgefallene Prothese gründlich waschen, reinigen und falls erforderlich, trockene Zementreste mit einer Nadel von der Passfläche der Prothese entfernen. Dann die Prothese auf den Zahn bzw. die Zähne aufsetzen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Prothese fest und bequem sitzt, und sie auch bei geschlossenem Kiefer nicht wackelt.

### Gebrauchsanweisung:

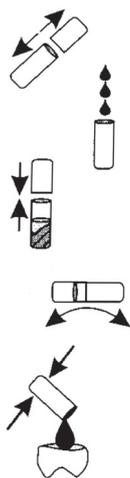

1. Eine Kapsel aus der Packung nehmen. Durch leichtes Antippen das Pulver in der größeren Kapselhälfte sammeln. Dann die Kapselhälften auseinanderziehen.
2. Ungefähr drei Tropfen Wasser aus dem Wasserhahn in die Kapselhälfte mit dem Pulver tropfen lassen.
3. Die Kapsel schnell wieder verschließen.
4. Die Kapsel zwischen Daumen und Mittelfinger halten und drei Sekunden lang schütteln.
5. Die Kapsel öffnen und das Zementgemisch auf die Passfläche der Prothese aufbringen. Jetzt die Prothese wieder einsetzen und hin- und herbewegen, bis sie fest sitzt. Das Gebiss schließen, um zu überprüfen, ob die Prothese bequem sitzt. Falls dies nicht der Fall ist, die Prothese schnell entfernen und den Zementiervorgang wiederholen.
6. Nicht länger als 28 Tage verwenden.

**Aufbewahrung:** Nach Verwendung gut verschließen und kühl und trocken aufbewahren.

**Inhaltsstoffe in g/100:** Zinkoxid 64,93, Polyacrylsäure 22, Magnesiumoxid 13, Eisenoxid 0,07.

**3 vordosierte Kapseln á 1g e**


Wissenschaftliche  
Produktentwicklung/Hersteller:  
**GAP Research Company Ltd.,**  
Unit 2, Ebbsfleet Estate, Stonebridge Road  
Northfleet, Kent DA11 9DZ, UK.



Vertrieb:  
Dikropha GmbH  
4600 Wels, AUSTRIA  
office@dikropha.com  
www.dikropha.com

# Brücke/Krone locker?

## DIKRO-FIT SOFORTHILFE • SOFORTHILFE

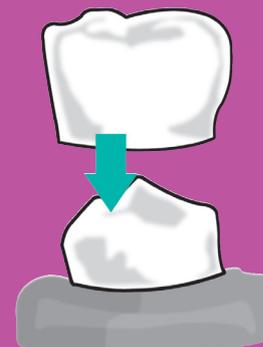

Ein praktischer  
Zement für das  
vorübergehende  
Befestigen  
locker gewordener  
Zahnprothesen.

**Wasser zufügen,  
mischen  
und anwenden**

Gebrauchsinformation  
auf der Rückseite  
beachten!



# NOTFALL

lockere Zahnkrone

## DIKRO-FIT

als Zwischen-Lösung

Die heute gebräuchlichen Prothesen sind stabil und zuverlässig fixiert. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass sich die Prothese von der Basis löst. Ein Notfall, der gerade auf Reisen oder im Urlaub sehr unangenehm ist. Hier bietet sich **Dikro-Fit** zur Selbsthilfe an.

**Dikro-Fit** bietet ausreichende Haltbarkeit und vorübergehenden Schutz für den Zahnnotfall.

## DIKRO-FIT

gehört in Ihre Reiseapotheke  
besonders bei Auslandsreisen

# DIKRO-FIT

hat Vorteile für Patient  
und Zahnarzt

1. Ein wichtiges zahnhygienisches Problem wird auf einfache Art und Weise gelöst.
2. Man kann in Ruhe und ohne zeitlichen Druck einen Zahnarzttermin vereinbaren.
3. Das Produkt benötigt nur minimale Vorbereitung, ist von gleichbleibender Qualität und damit sicher.
4. Zahnärzte sind mit Provisorien dieser Art vertraut und können, während der Behandlung, **Dikro-Fit** ohne Probleme entfernen.

Der Hygienestandard in den industrialisierten Ländern hat bei zahnärztlichen Eingriffen ein sehr hohes Niveau erreicht. Dies kann allerdings in weniger entwickelten Ländern nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden.

Das Risiko, sich z.B. an Aids oder Hepatitis B zu infizieren, ist dort unvergleichbar höher. Deshalb ist es für jeden, der in diese Regionen fährt, gleichgültig ob auf Urlaub oder Geschäftsreise, äußerst wichtig wachsam und vorsichtig zu sein.

Hat der Betroffene **Dikro-Fit** in seiner Reiseapotheke kann er dieses Infektionsrisiko im Notfall verhindern.

SOFORTHILFE • SOFORTHILFE • SOFORTHILFE • SOFORTHILFE