


Dikropha **SUPERFIX**

Do-it-Yourself Prothesen-Reparatur Set

Hinweise

Superfix ist ein selbsthärtendes Polymethylmethacrylat Polymer zur Reparatur von:

- Gebrochenen oberen Acryl-Prothesen (A)
- Gebrochenen unteren Acryl-Prothesen (B)
- Ausgefallenen oder gelockerten Acryl-Zähnen von Vollprothesen (C)

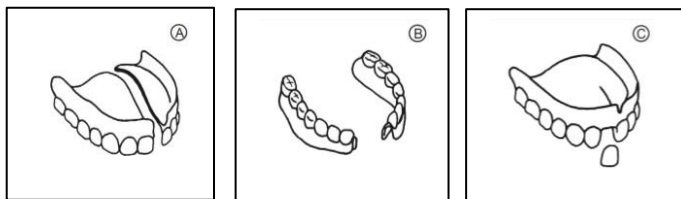





Inhalt

- 3 Easy-Mix Superfix-Beutel, 1 Tube Superfix Haftklebstoff
- 1 Blatt Schleifpapier

Gebrauchsanleitung




Vorbereitung der Prothese

1. Reinigen und trocknen Sie alle Teile der Prothese. Verwenden Sie Alkohol um hartnäckige Rückstände und Spuren von Klebstoff zu entfernen.
2. Setzen Sie alle Teile zusammen und achten Sie darauf, dass kein Stück fehlt.
3. Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff entlang der gesamten Bruchstelle an einem Prothesenteil auf.
4. Drücken Sie vorsichtig die Teile der Prothese zusammen, so dass die Bruchstellen genau aufeinanderpassen.
5. Nach 20 Sekunden entfernen Sie den überschüssigen Klebstoff, welcher aus dem Spalt austritt, mit einem feuchten Tuch.
6. Sobald der Klebstoff fest und trocken ist, setzen Sie die Prothese in Ihrem Mund ein und überprüfen Sie den Sitz. Die Prothese sollte perfekt sitzen. Falls dem nicht so ist, lösen Sie die Teile voneinander und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.
7. Rauen Sie mit dem Schleifpapier entlang der geklebten Bruchstelle auf der „Zungenseite“ die Prothese auf und formen Sie eine Vertiefung in welchem der Superfix Kunststoff aufgebracht wird. Die Vertiefung sollte ungefähr 1 mm tief und 8 mm breit sein. Rauen Sie die Prothese nicht entlang der „Zahnfleischseite“ (Gaumenseite) auf.

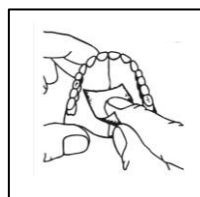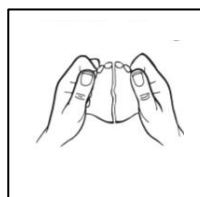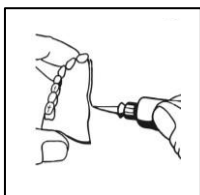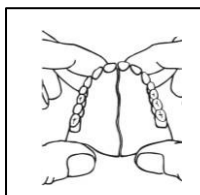




Anmischen des Superfix Kunststoffs

8. Nehmen Sie einen Beutel Superfix und drücken Sie die klare Flüssigkeit (am besten mit einem runden Stäbchen) in Richtung des rosa Pulvers. Drücken Sie die Flüssigkeitsblase solange bis sich die mittlere Versiegelung öffnet und die Flüssigkeit in das rosa Pulver übertritt.
9. Vermischen Sie nun mit streichenden Bewegungen die Superfix Flüssigkeit und das Pulver, bis sich eine gleichmäßige rosa Paste gebildet hat. Achten Sie darauf das ganze Pulver mit der Flüssigkeit zu vermischen.

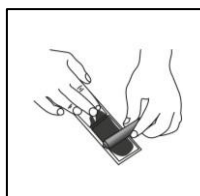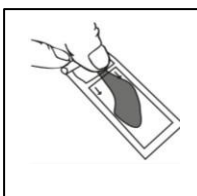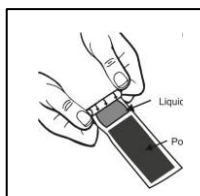

Reparatur der beschädigten Prothese

10. Schneiden Sie den Superfix Beutel entlang der mittigen Versiegelung auf und drücken Sie eine gleichmäßige Menge an Paste in die Vertiefung.
11. Wischen Sie nach 2 Minuten überschüssige Superfix Paste mit einem feuchten Tuch ab
12. Legen Sie für ungefähr 30 Minuten die reparierte Prothese in heißes Wasser (circa 60°C).
13. Glätten Sie mit dem Schleifpapier die rauen oder scharfen Kanten des ausgehärteten Superfix Acryls.
14. Reinigen Sie die reparierte Prothese mit einem üblichen Prothesenreinigungsmittel bevor Sie diese wieder einsetzen.

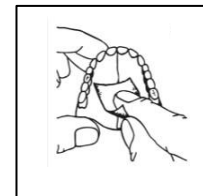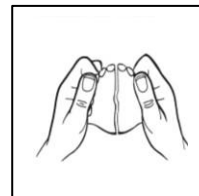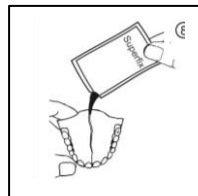

Bitte um Beachtung: Die vorherige Beschreibung bezieht sich auf die Reparatur von gebrochenen oberen oder unteren Prothesen. Für das Wiedereinsetzen von ausgefallenen oder gelockerten Acryl Zähnen verändern Sie die Gebrauchsanleitung wie folgt:

Vorbereitung des Zahnes

1. Entfernen Sie mit dem Schleifpapier etwas von dem alten ausgehärteten Acryl in der Zahneinfassung der Prothese.
2. Legen Sie das Schleifpapier auf eine flache Oberfläche und reiben Sie daran die Passfläche des ausgefallenen Zahnes, um das alte, gehärtete Acryl zu entfernen.

Wiedereinsetzen des ausgefallenen Zahnes

3. Geben Sie eine kleine Menge des Superfix Acryl Gemisches in die vorbereitete Zahneinfassung (s. Pt. Anmischen des Superfix Kunststoffes)
4. Drücken Sie den Acryl-Zahn in die Einfassung und achten Sie darauf, dass er mit den angrenzenden Zähnen gleichgerichtet ist. Danach folgen Sie den Anweisungen der oben genannten Schritte 11 bis 14.

Zusammensetzung

Puder: Polymethylmethacrylat Polymer >98%. CAS-Nr. 9011-14-7
 Flüssigkeit: Methylmethacrylat Monomer >96%. CAS-Nr. 80-62-6
 Haftklebstoff: Ethyl 2-Cyanacrylat 60 -100 %. CAS-Nr. 7085-85-0 60
 Weitere Informationen erhalten Sie in der Superfix MSDS.

Warnhinweise

Nicht verwenden, wenn Sie allergisch oder sensibel gegenüber Acrylat sind. Nicht verwenden, um flexible Prothesen zu reparieren. Superfix Acrylat haftet nicht auf Metallrahmen von Kobalt-Chrom Prothesen. Nicht verwenden zum Kleben natürlicher Zähne oder eines locker gewordenen Zahnersatzes (Kronen, Inlay, Brücken ...). Nicht zur Reparatur von „Implantat-gestützte Prothesen“ verwenden. Temporäre Reparatur für 28 Tage.

Achtung

Haftklebstoff beinhaltet Ethyl-Cyanacrylat  REIZEND Vermeiden Sie Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung. Dampf und Dunst nicht einatmen. Hände nach dem Anfassen gründlich waschen. Kontakt mit Textilien und Papier vermeiden. Ein Kontakt mit diesen Materialien kann eine schnelle Polymerisation verursachen, die stark reizende Dämpfe freisetzen und Verbrennungen verursachen kann UN 3334 - Class 9 - PG 3	Flüssigkeit beinhaltet Methylmethacrylat Monomer   REIZEND ENTFLAMMBAR Die Flüssigkeit im Beutel ist ein stabilisierter Methylmethacrylat Monomer. Flüssigkeit und Dämpfe sind leicht entflammbar. Kann allergische Hautreaktionen und Atemwegsreizungen verursachen. Von heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. UN1247 - Class 3 - PG2
--	--

Lagerung

Lagern Sie das Produkt in ihrer originalen Verpackung und unerreichbar für Kinder.